



**ENVOI PAR  
CHRONOPOST  
DES PRÉLÈVEMENTS  
POUR ANALYSE  
TOXICOLOGIQUE**

**LABORATOIRE DE  
TOXICOLOGIE  
Hôpital J. Monod  
B.P. 24  
76083 LE HAVRE CEDEX**


# PROCÉDURE D'ENVOI

## Les fournitures Chronopost

- enveloppe souple Chronopost prêt-à-poster



- étiquette auto-adhésive et pochette de transport e-chronopass

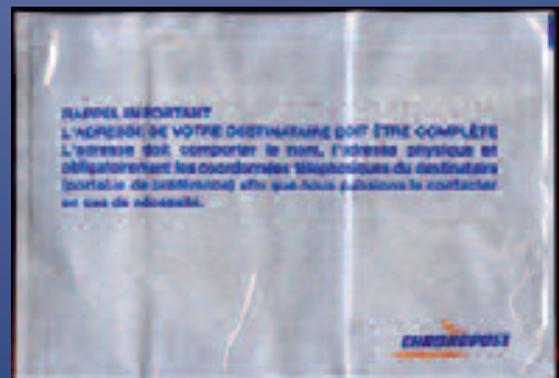

Les emballages, les étiquettes auto-adhésives et les pochettes de transport sont fournis par le laboratoire de toxicologie du Havre

# PROCÉDURE D'ENVOI

## Préparation du colis

### ➤ Alcoolémie et stupéfiants

1. Les échantillons de sang (tubes à bouchon gris ou vert, flacon en verre à bouchon vissé) doivent être conditionnés dans les tubes transparents à bouchon vissé bleu




# PROCÉDURE D'ENVOI

## Préparation du colis

### ➤ Alcoolémie et stupéfiants

2. Ces tubes transparents à bouchon vissé bleu doivent être conditionnés dans les pochettes blanches contenues dans les kits de prélèvements

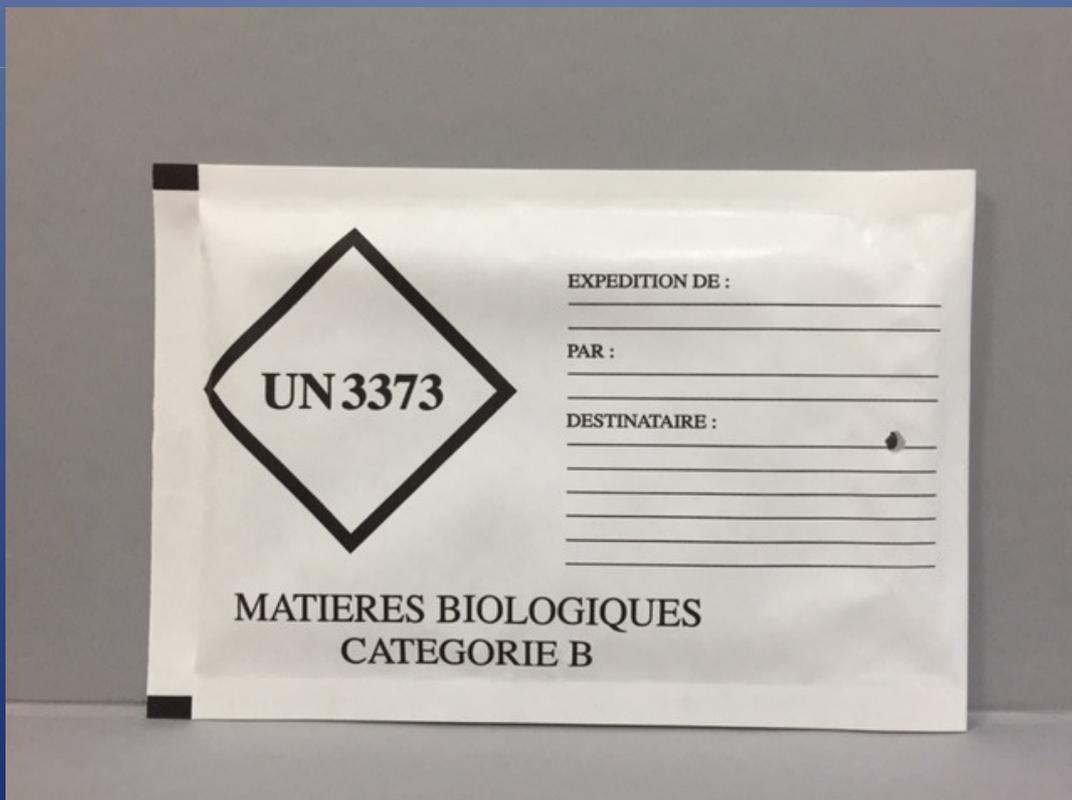


# PROCÉDURE D'ENVOI

## Préparation du colis

### ➤ Alcoolémie et stupéfiants

3. Dans la mesure du possible, les pochettes blanches contenant les prélèvements seront transmises dans une boîte en carton (« kit de prélèvement »)

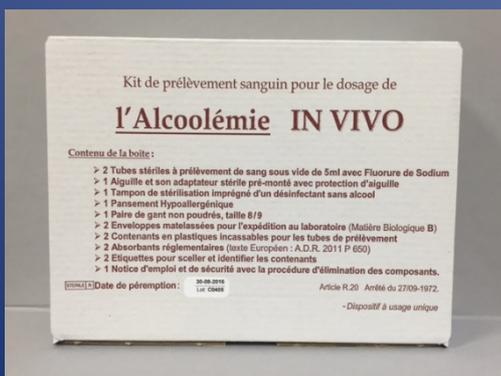


# PROCÉDURE D'ENVOI

## Préparation du colis

### ➤ Alcoolémie et stupéfiants

#### 4. Envoi simultané de plusieurs expertises

- Il est possible de transmettre plusieurs expertises dans une seule enveloppe chronopost

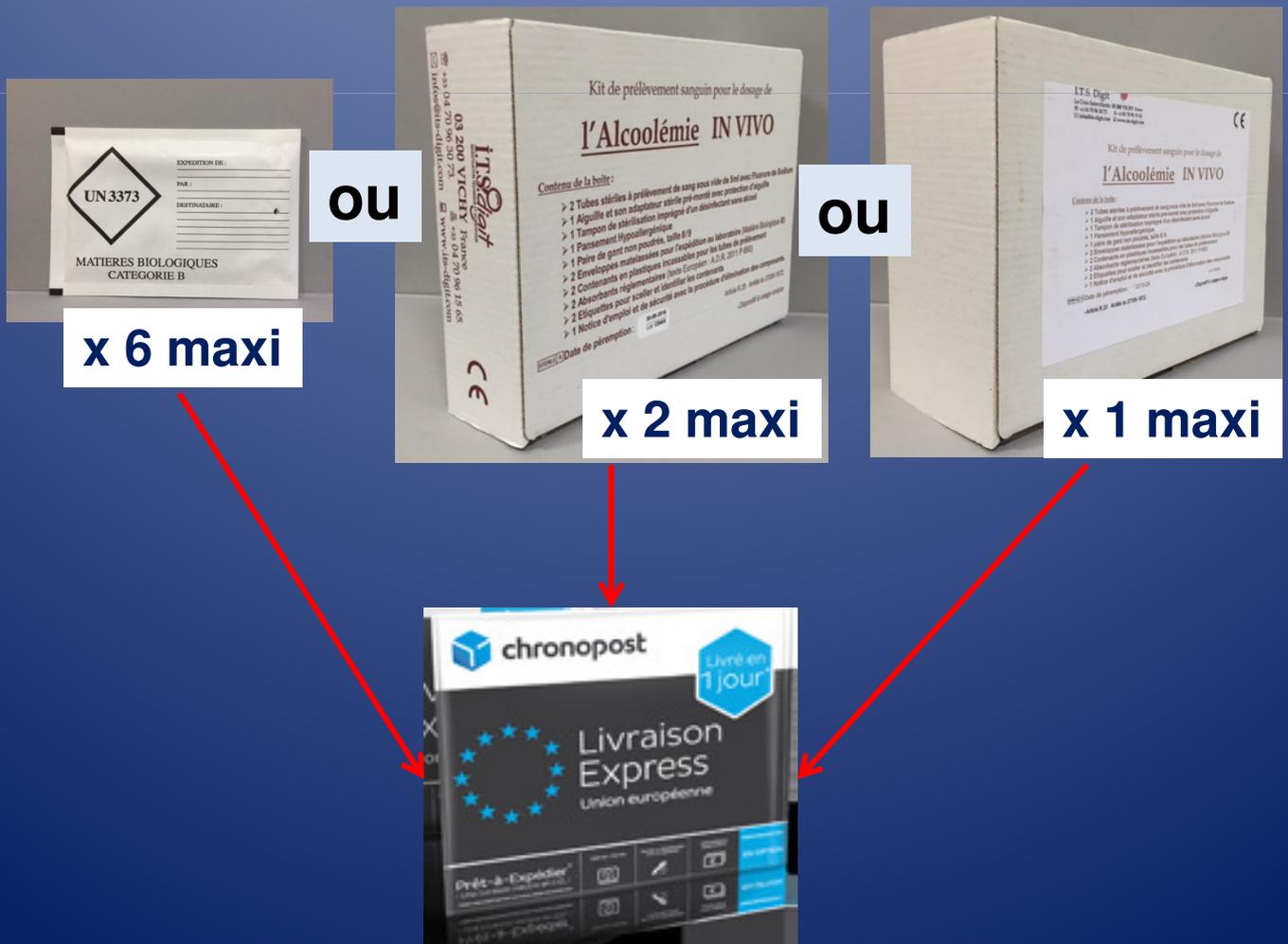

# PROCÉDURE D'ENVOI

## Préparation du colis


### ➤ Prélèvements d'autopsie ou examen de corps

Les échantillons biologiques doivent être contenus dans 1 ou 2 boîtes type « kit de prélèvement »



**x 2 maxi**

**ou**

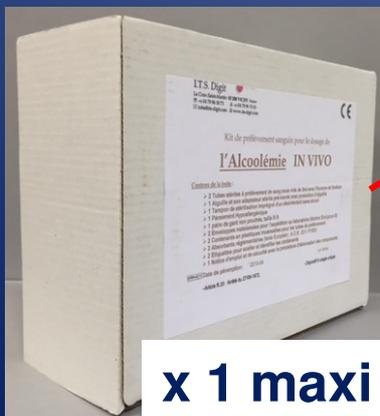

**x 1 maxi**



# PROCÉDURE D'ENVOI

## Etiquetage avec les feuilles auto-adhésives e-chronopass

- Les étiquettes de transport pré-imprimées par le laboratoire (adresses expéditeur et destinataire) sont à coller directement sur l'emballage chronopost



Les étiquettes de transport pré-imprimées par le laboratoire ne sont valables que 60 jours à partir de la date d'impression

# PROCÉDURE D'ENVOI

## Etiquetage avec les pochettes e-chronopass :


- Les pochettes plastiques e-chronopass sont à coller sur le colis pour y glisser l'étiquette de transport e-chronopass

Dans ce cas, il faut contacter le laboratoire afin d'obtenir le e-chronopass (pdf) par courriel pour l'imprimer sur une feuille papier A4 à glisser dans la pochette e-chronopass



Etiquette e-chronopass imprimée sur feuille papier A4

Glisser l'étiquette dans la pochette e-chronopass

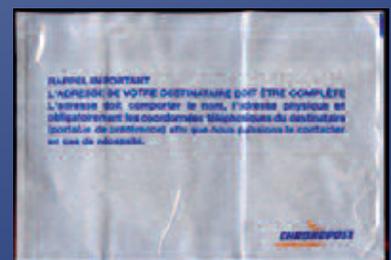

Coller la pochette e-chronopass



# CONTACTER LE LABORATOIRE

## TELEPHONE / COURRIEL

Dr SAUSSEREAU

02 32 73 48 42

[elodie.saussereau@ch-havre.fr](mailto:elodie.saussereau@ch-havre.fr)

Dr IMBERT

02 32 73 32 23

[laurent.imbert@ch-havre.fr](mailto:laurent.imbert@ch-havre.fr)

Secrétariat

02 32 73 32 18

[sec.pharmaco@ch-havre.fr](mailto:sec.pharmaco@ch-havre.fr)

**FAX**

02 32 73 32 38

**SITE WEB**

[www.labo-expertox.ch-havre.fr](http://www.labo-expertox.ch-havre.fr)